


# 注射筆操作疑難排解




注射筆卡住，有兩種情況：

劑量選擇鈕難轉

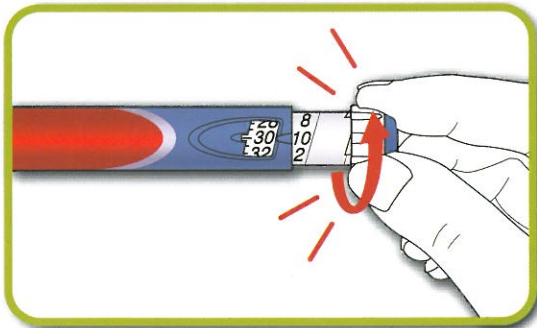

劑量選擇鈕按不下去

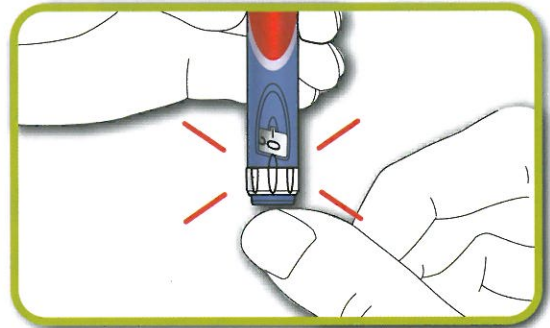

★ 這些狀況都表示注射筆內壓力升高，發生原因可能是，還沒安裝針頭就直接使用注射筆，或針頭已部分或完全堵塞。


如果發生以上任一情況，請依照以下說明來處理。

避免方式一：更換新的針頭



一定要使用合適的針頭。  
建議每次注射都使用新的針頭，可避免注射時的疼痛或針頭堵塞。



全新未用過針頭

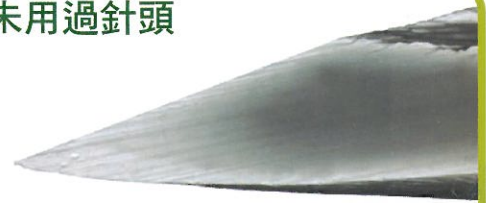

已用過多次的針頭




**避免方式二：**  
針頭一定要對準後平行套入注射筆，  
才可能避免下列狀況。

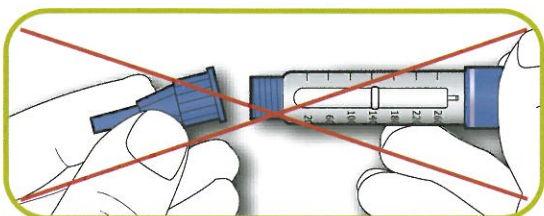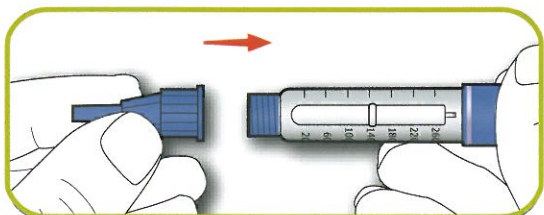

常見角度不對，針頭和筆針傾斜接合，導致：


- \* 注射鈕按不下去
- \* 胰島素外漏
- \* 針頭外側彎掉，無法送出胰島素

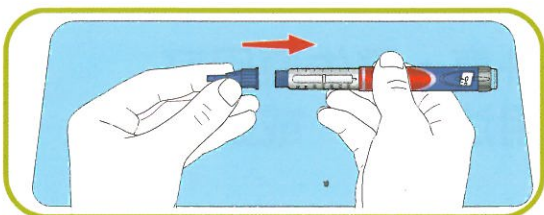

如果將針頭套接至注射筆有困難，請將注射筆  
放在平坦表面上（如桌上），然後再將針頭慢  
慢套入注射筆。

### 避免方式三：裝上針頭後，再轉動劑量選擇鈕。

在注射筆還沒裝上針頭前，請勿先轉動  
選擇鈕調整劑量或按下注射鈕。因為如  
果不小心按到，會導致劑量選擇鈕無法  
迴轉並卡住，必須裝上針頭，並將劑量  
注射完畢後，才能回復正常使用。為了  
方便操作，建議正確套上針頭後，再轉  
動劑量選擇鈕進行注射。

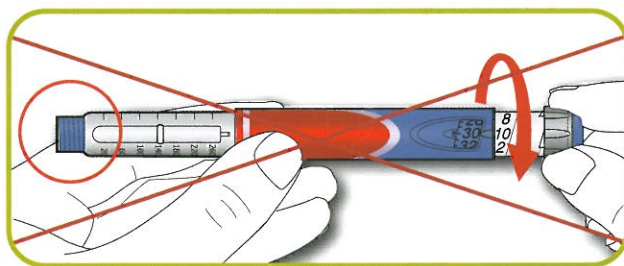

### ★ 筆針儲存小秘訣：

1. 未開封的胰島素注射筆應儲存在2-8°C以下的環境。
2. 使用中的胰島素注射筆可存放於室內陰涼處、低於25°C的環境。
3. 注射筆開啟後保存期限：4週。



諮詢專線：0800-395168

TW.GLU.13.01.02